

soporte neumático corto para caminar (01A-S, 01A-M, 01A-L)



The SP Walker combina apoyo semineumático con la protección semirígida del soporte. Las células de aire ajustables que se encuentran dentro del soporte acolchan el tobillo proporcionando confort y soporte a la medida. Dicha protección y soporte son efectivas para el tratamiento de lesiones a la parte delantera, media y trasera del pie; fracturas del pie; lesiones y procedimientos al tejido blando, tendones o ligamentos; cuidados agudos o postoperatorios (por ej., escisión de juanetes, osteotomía, etc.); y torceduras de tobillo.

El SP Walker tiene las características siguientes:

- Facilidad de movimiento y mayor comodidad obtenida con la suela de arco baja
- Espacio abundante para apósitos en la base amplia del pie
- Reducción superior del edema con la compresión neumática pulsante
- Apoyo y protección segura con un soporte semirígido y células de aire ajustables

**INSTRUCCIONES:** (Una media de algodón aumentará su comodidad (no se incluye))

### 1 Prepare la abrazadera ortopédica

Desabroche las tiras, quite el panel delantero y abra el forro.

### 2 Póngase la abrazadera ortopédica

Mientras está sentado, ponga el pie en la abrazadera. Encaje el talón contra la parte trasera y tire del forro hacia delante para quitar cualquier arruga (Ilust. 1). Envuelva el pie y luego el tobillo con el forro, estire las arrugas y amárrela (Ilust. 2). Coloque el panel delantero de modo que el logotipo de Aircast quede sobre los dedos del pie. Amarre el panel delantero con la parte inferior dentro de la abrazadera y la parte superior fuera. Amarre las tiras de abajo hacia arriba (Ilust. 3). Apriételas hasta que queden seguras y cómodas.

### 3 Ajuste la compresión de las células de aire


Al principio, las células de aire del SP Walker están desinfladas. Para inflarlas, introduzca con firmeza la punta para "inflar" de la perilla en la válvula y oprímala hasta que la célula de aire se sienta ajustada (Ilust. 4). Empiece con la válvula que está en la parte de adentro de la pierna y después siga con la de la parte afuera.

En caso de inflarlas demasiado, desinfe las células de aire. Para desinflar las células de aire, introduzca la punta para "desinflar" de la perilla en la válvula y apriete hasta que sienta la presión cómoda.


Más presión proporciona más protección cuando camina, menos presión proporciona más comodidad cuando está sentado o recostado. (El nivel de compresión también se puede ajustar apretando y aflojando las tiras.)



Ilust. 1

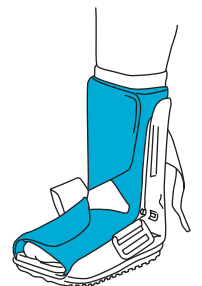

Ilust. 2

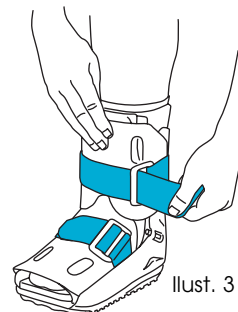

Ilust. 3



Ilust. 4

 **PRECAUCIÓN**

Como pasa con todos los inmovilizadores de las extremidades inferiores, tales como el yeso o los aparatos ortopédicos, aquellos pacientes que no tengan sensación (por ej. por anestesia posoperativa, neuropatía, etc.) se deben vigilar con frecuencia para ver si se les presentan «zonas calientes», irritación de la piel o para tratar la herida.

Tenga cuidado cuando camine sobre superficies resbaladizas o mojadas para evitar lastimarse.

Las leyes federales sólo permiten la venta de este producto por un profesional de asistencia a la salud licenciado o bajo sus órdenes.

 **ADVERTENCIA**

No infle las células de aire demasiado. Si las células de aire se inflan demasiado pueden causar una irritación significativa de la piel a los pacientes que padezcan de neuropatía diabética. Disminuya la compresión de las células de aire si siente incomodidad o si ocurre cualquier cambio visible en la piel. No use este aparato en pacientes que sean incapaces de comunicarle si sienten cualquier incomodidad física.

**DÓNDE HAY MUCHA ALTITUD**

En los lugares donde hay mucha altitud, las células de aire se expanden más allá del nivel óptimo. Ajuste la presión de las células apretando o aflojando las tiras.

**CUIDADO**

El forro de espuma de goma del SP Walker se puede lavar a mano usando agua fría y un jabón suave y se puede secar al aire. No la ponga en una secadora ni use ninguna otra fuente de calor para secarla.

**LATEX**

Ninguno de los productos Aircast contiene látex.

**GARANTÍA**

**Satisfacción** – Aircast devolverá el dinero con presteza por cualquier producto que no sea de la satisfacción del médico debido a cualquier razón.

**Durabilidad** – Los soportes de Aircast han sido diseñados para que duren todo el tiempo que el paciente original los necesite. Aircast puede, a su juicio, proporcionar un reemplazo de cualquier pieza que deje de servir bajo uso normal durante este tiempo siempre y cuando se le devuelva la pieza defectuosa a Aircast para ser analizada.

PATENTES EE.UU.: 5,577,998 Y OTROS PATENTES PENDIENTES

**AIRCAST**<sup>®</sup>

92 River Road  
Summit, NJ/USA 07902-0709

(908) 273-6349

**800-526-8785**

Fax (800) 457-4221

Fax (908) 273-1060

[www.aircast.com](http://www.aircast.com)

 R 11/22/04  
01A104E  
0127S